


## ◆ 検体容器の入れ方と 搬送方法(流産内容物)

- 1、BOXの中に、それぞれ青色(緑色)ウレタンスタンド1個と保冷剤3個(うち1個、夏季は2個を冷凍してください)を入れる。凍らせていない保冷剤を検体側に置く。
- 2、採取した流産容器(赤い蓋のカップ)のサンプルシールの記載と、容器のキャップが強く閉まっているかを確認する。ウレタンスタンドと緩衝材をカップが動かないように詰める。
- 3、その上に、記入済の「検査依頼書」(4枚綴りのうち、③と④)をのせる。折りたたんでいただいてもかまいません。

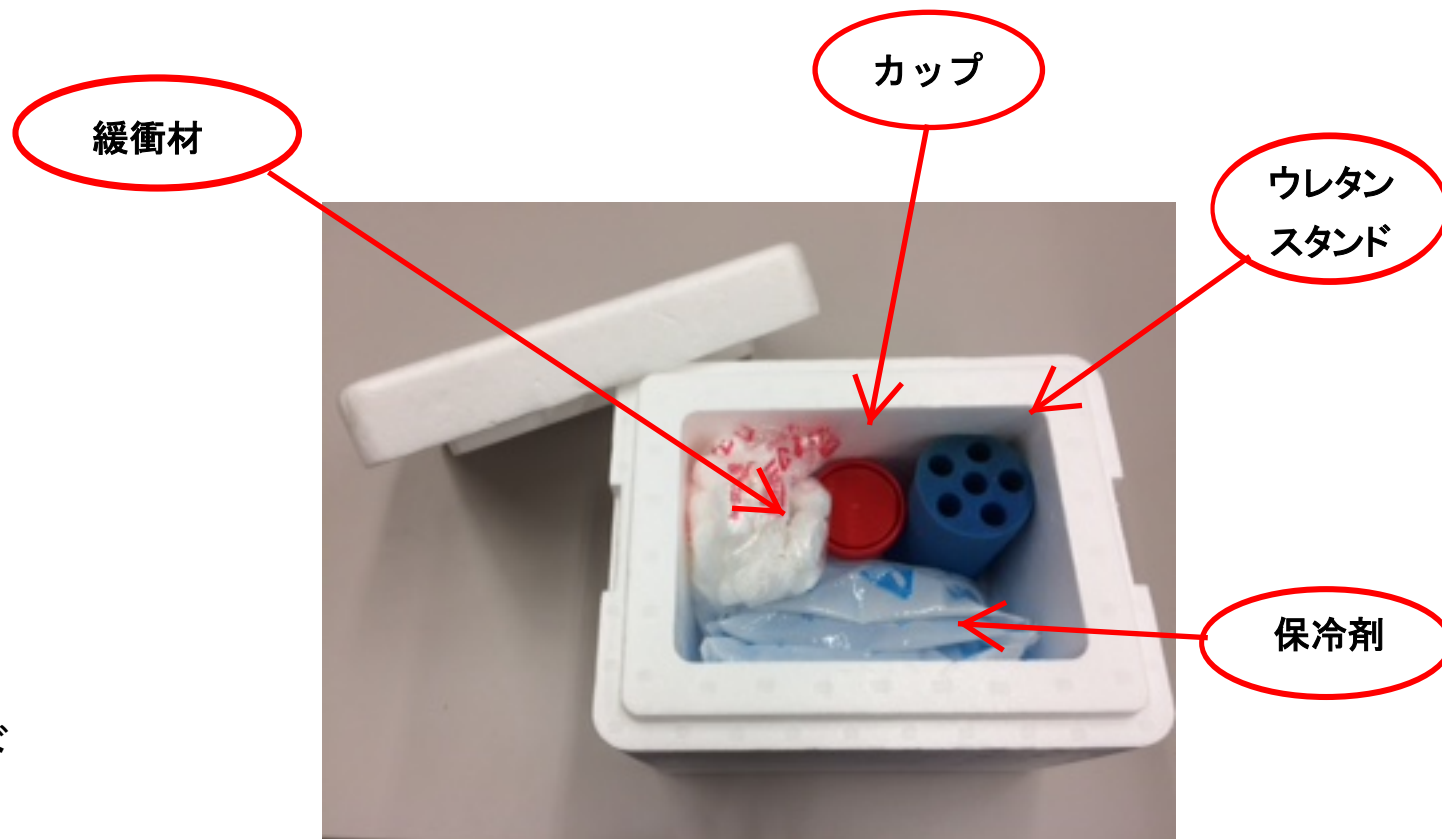

4、ダンボールをガムテープなどで封をして、(事前にお送りしております) 弊社宛の着払伝票と、「冷蔵タイプ」シールを貼る。

5、運送業者営業所から検体を冷蔵便で発送する。発送が完了したら、当日中に弊社まで連絡。  
(電話かFAX、メールでお願いいたします)

