


# ◆ 検体容器の入れ方と 搬送方法 (羊水・末梢血)

- 1、BOXの中に、それぞれ青色(緑色)ウレタンスタンド1個と保冷剤3個(うち1個、夏季は2個を冷凍してください)を入れる。凍らせていない保冷剤を検体側に置く。
- 2、採取したコニカルチューブ(羊水容器1名分2本)のサンプルシールの記載と、容器のキャップが強く閉まっているかを確認する。チューブをウレタンスタンドに深く差しこみ、動かないように緩衝剤を詰める。
- 3、その上に、記入済の「検査依頼書」(4枚綴りのうち、③と④)をのせる(折りたたんでいただいてかまいません)。

\* 末梢血の場合も同じです。通常、1名につき1本提出されます。

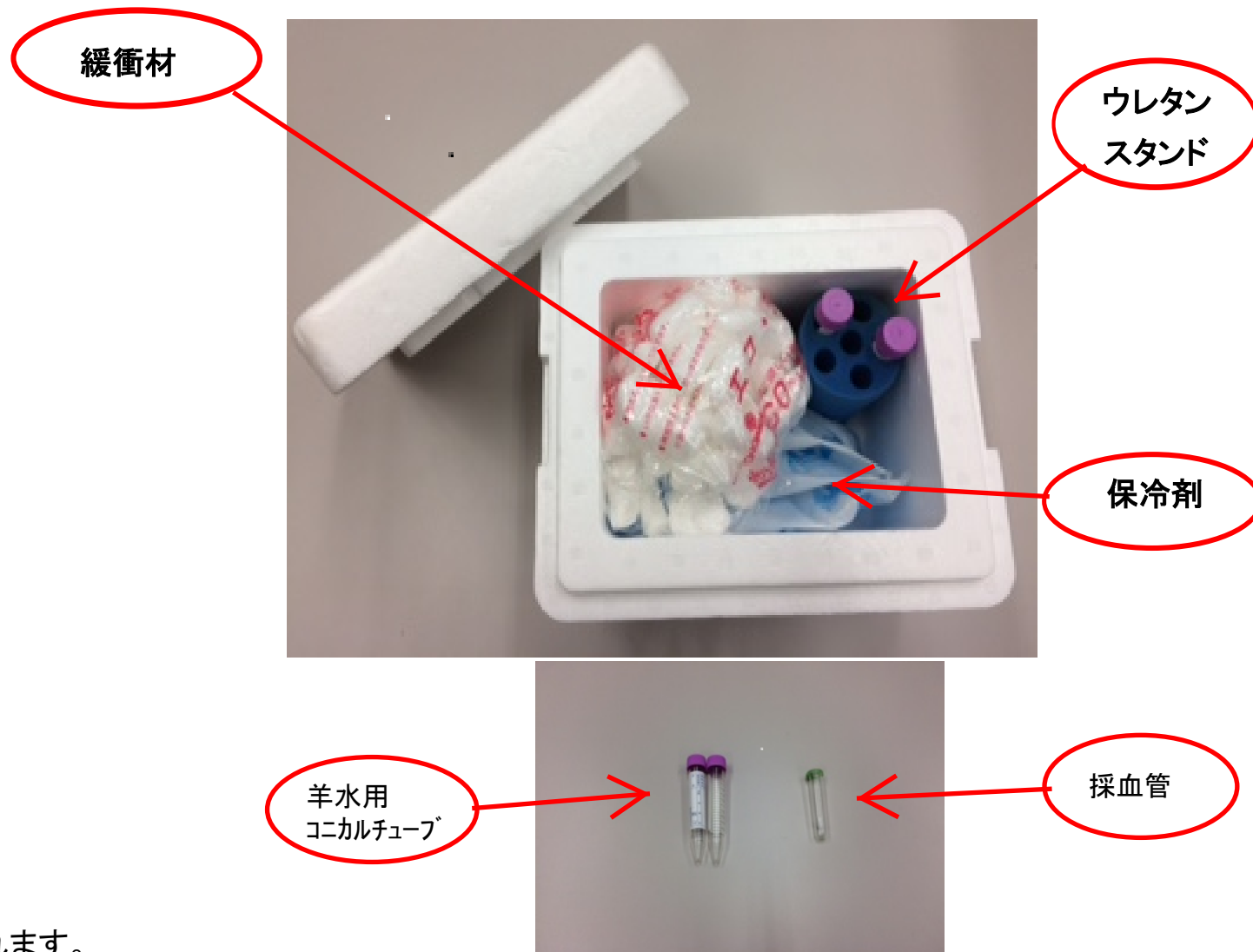

4、ダンボールをガムテープなどで封をして  
(事前にお送りしております)弊社宛の  
着払伝票と、「冷蔵タイプ」シールを貼る。



5、運送業者営業所から検体を冷蔵便で  
発送する。発送が完了したら、当日中  
に弊社まで連絡。  
(電話かFAX、メールでお願いいた  
します)

